

## Arzt-Menü DANA RS Insulinpumpe

Im **Arzt-Menü** können zahlreiche persönliche Diabetes-Einstellungen vorgenommen werden. Um Zugriff auf das **Arzt-Menü** zu bekommen, müssen Sie eine entsprechende **PIN-Nummer** (ab Werk=3022) eingeben. Sie können auch Ihre persönliche vierstellige **PIN-Nummer** programmieren (Wenden Sie sich hierzu bitte an den Kundenservice).



1) Drücken Sie im **Haupt-Menü** gleichzeitig die **+**, **-** und **▶** Tasten. Anschließend erscheint das **PIN-Menü**.



2) Stellen Sie nun, mit Hilfe der **+**, **-** und **▶** Tasten die **PIN-Nummer 3022** oder Ihre **persönliche PIN-Nummer** ein. Abschließend bestätigen Sie bitte mit **OK**.

3) Das **Arzt-Menü** erscheint.

Drücken Sie **▶**, um auf die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zu wechseln. Verwenden Sie bitte **+** oder **-**, um die angezeigten Einstellungen zu verändern.



**1. TAGESZEITEN** (Bolus-Anzeige für Früh / Mittag / Abend) **EIN / AUS**

**2. MELODIE** (Hinweis nach der Bolus-Abgabe) **0 - 150** (Minuten)

**3. BOLUS BLOCK** (Bolus-Begrenzung) **0 - 180** (Minuten)

**4. BOLUS** (Bolus-Erhöhung) **0.05, 0.1, 0.5 oder 1.0** (I.E.)

**5. BASAL** (Basal-Erhöhung) **0.01 / 0.1** (I.E.)

**6. ZIEL BZ** (Ziel-Blutzuckerwert in mg/dL oder mmol/L)

**7. AKTIVES INSULIN** (aktives Insulin von vorherigen Bolus-Abgaben / I.E.)

**8. INSULIN** (Abbau des verwendeten Insulin in % / Stunde) **0 - 50 %**

**9. MAX. BASAL** (Maximale Basalinsulin-Menge / Stunde) **0 - 16** (I.E.)

**10. MAX. BOLUS** (Maximale Bolusabgabe) **0 - 80** (I.E.)

**11. MAX. TAG** (Maximale Tagesmenge an Insulin) **0 - 300** (I.E.)

**12. BOLUSBEGRENZUNG** (Max. Bolusmenge) **AUS / 100 - 300 %**

**13. VERSCHLUSS:**

**L:** Geringe Verschluss-Empfindlichkeit (> 20 I.E. Basalinsulin/Tag)


**M:** Mittlere Verschluss-Empfindlichkeit (bei 11 - 20 I.E. Basalinsulin/Tag)

**H:** Hohe Verschluss-Empfindlichkeit (bei 1 - 10 I.E. Basalinsulin/Tag)

**14. EXIT** (Ausgang)

Nach Drücken von **▶** bei **EXIT** gelangen Sie erneut auf den Punkt 1.

Nach Drücken von **OK** bei **EXIT** können Sie die Einstellungen sichern.

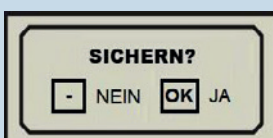

Drücken Sie **-**, wenn Sie die Einstellungen nicht sichern möchten oder **OK**, wenn Sie die Einstellungen sichern möchten. Anschließend kehren Sie zurück zur **Basis-Anzeige**.